

## <別紙> コバス 6000 c501 モジュール 冷却ユニットの性能劣化に関わる温度制御異常アラーム

### アラームコード

#### 36-1 保冷库温度異常(注意)

内容 保冷库の冷氣温度が範囲外です。

処置 以下の点を確認してください。

- 試薬ディスクシャッターが開いていないか確認してください。
- 装置の前面カバーを開けて、放熱器フィルターのほこりなどを取り除いてください。
- アラームが発生し続ける場合には、担当のサービス部門に連絡してください。